


Manipulação das Canetas de Insulina e Incretinas

Para assegurarmos a administração da dose correta de insulina/incretina aos pacientes, devemos fazer o Teste de Segurança das canetas com o intuito de garantir que a caneta e a agulha estão funcionando adequadamente e para removermos as bolhas de ar.

O teste deve ser feito pelo preparador, ainda na sala de preparo, e antes de selecionar a dose de insulina/incretina prescrita pelo médico.

Passo-a-passo para realização do Teste de Segurança:

1. Usando máscara e após a correta higiene das mãos, selecione **DUAS** unidades de insulina na caneta;
2. Faça a antissepsia do lacre de borracha utilizando álcool a 70%;
3. Acople a agulha AutoShield® à caneta em ângulo reto;
4. Segure a caneta com a agulha apontando para cima e bata levemente no reservatório para que qualquer bolha de ar suba até a agulha;
5. Destampe a agulha e pressione o botão injetor da caneta até voltar para marcação **zero** e verifique se há saída de insulina na ponta da agulha;
6. Se sim, tampe a agulha, selecione a dose prescrita e encaminhe para Dupla Checagem junto com a etiqueta para que seja administrada;
7. Se não, verifique se há bolhas de ar e repita o teste de segurança mais duas vezes para removê-las. Se ainda assim a insulina não aparecer, substitua a agulha e repita o processo. Se não tiver sucesso, a caneta deverá ser substituída.

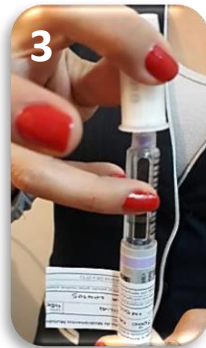

Atenção:

Para caneta de incretinas, como o Victoza, o procedimento é o mesmo apenas deve ser feito selecionando o símbolo de checagem de fluxo



Qualquer dúvida acionar Enfermeira Especialista ou Enfermeiros Referência em Diabetes e Alterações Glicêmicas através da planilha disponível na Intranet