



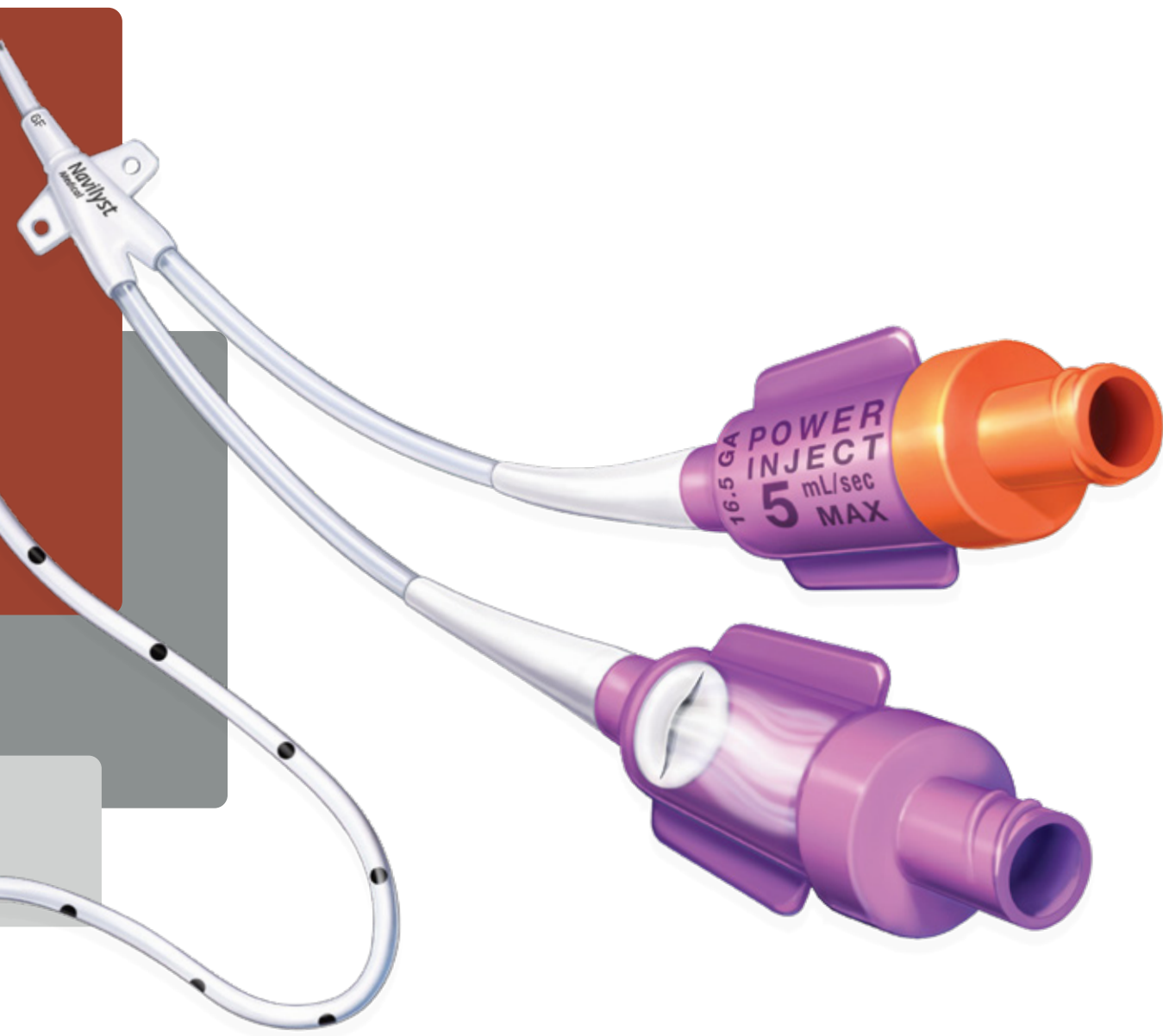

PICC Xcela® com tecnologia de válvula PASV®

Redefinindo o PICC

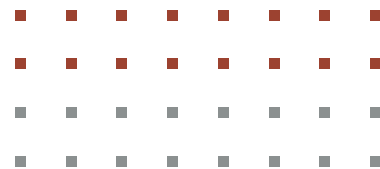

Combina o poder da válvula PASV com infusão em alta pressão

O PICC Xcela* com tecnologia de válvula PASV* é projetado para fornecer um elevado grau de segurança, facilidade e confiança no cuidado do paciente.

Infusão em alta pressão

Funcionalidades avançadas e com grande diâmetro interno, permitem ao PICC Xcela com tecnologia de válvula PASV fornecer poderosas taxas de fluxo em injeção necessária para as tomografias computadorizadas (TCs) com contraste, compatíveis com até 325 psi.

Design Integrado

O design da tecnologia de válvula PASV resiste automaticamente ao retorno do fluxo, reduzindo o refluxo de sangue que pode ocorrer em casos de tosse, vômito, aumento de pressão intratorácica ou até mesmo ao término de uma medicação.

Confiança nos Resultados

O design da tecnologia da válvula PASV resiste automaticamente ao refluxo, reduzindo o retorno sanguíneo que pode levar a complicações relacionadas ao cateter, como infecção de corrente sanguínea.

Assertividade na Escolha

Com a inclusão da tecnologia de válvula PASV ao PICC Xcela, os profissionais terão a opção de escolher o cateter ideal para a terapia recomendada.




Família Xcela

- 3 modelos diferentes (com válvula PASV, sem válvula PASV e Híbrido)
- Sistema com marcação centímetro a centímetro
- Ponta do cateter pode ser cortada
- Radiopaco
- O cateter Xcela Híbrido tem 1 via principal sem válvula e alta pressão para infusão de contraste e mensuração da PVC, e 2 outras vias com a tecnologia da válvula PASV




Tecnologia da válvula PASV: Projetada para infusão fácil e prevenção do refluxo

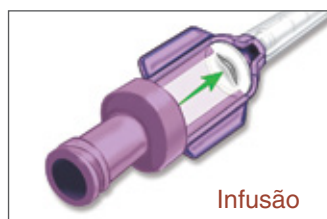


Infusão

Abre com um mínimo de pressão e fecha automaticamente após a infusão

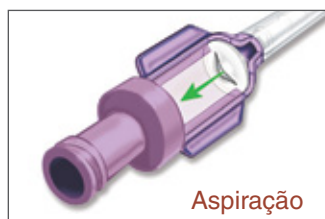

Aspiração

Abre para coleta e fecha automaticamente para resistir às flutuações de pressão que podem causar refluxo do sangue

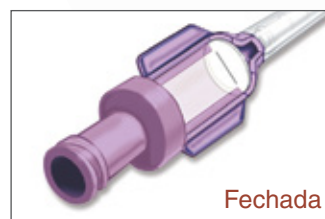


Fechada

Permanece fechada durante aumento normal na pressão venosa central para evitar o refluxo de sangue na ponta do cateter

Short Reverse Taper

- Projetado para minimizar a perda de sangue e infecção no local de inserção

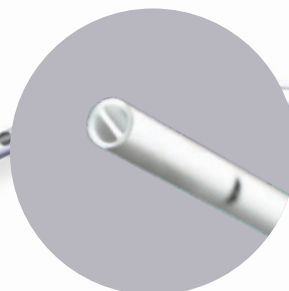


Diâmetro interno otimizado

- Projetado para proporcionar maiores taxas de fluxo a pressões mais baixas
- Projetado para minimizar o risco de oclusões do cateter
- Projetado para permitir a coleta de sangue

Facilidades de manutenção

- Recomendação mínima de flush semanal com solução salina para paciente em uso ambulatorial
- A utilização de solução salina pode limitar eventuais complicações e custos associados ao uso de heparina
- Material resistente ao álcool
- Extensões sem necessidade de clamps
- Liberdade para escolher seu conector sem agulha favorito
- A salinização do cateter antes e após cada medicação
- Mantém a técnica com alternância de pressão (turbilhonamento) ao salinizar o cateter

Tecnologia da válvula PASV:
Projetado para infusão fácil e
prevenção do refluxo

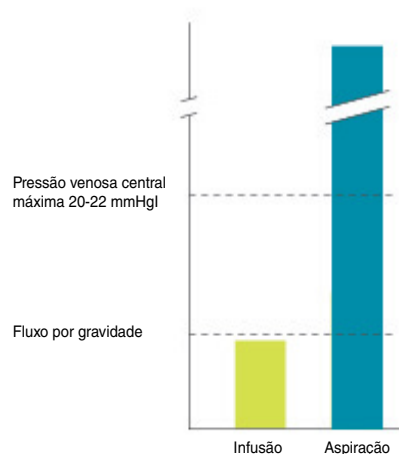

Xcela Híbrido PICC				
UPN	Referência	Luméns	Diâmetro externo (FR)	Diâmetro interno (GA)
Xcela Híbrido PICC c/ KIT MST GUIA 70 cm				
H965952420	95-242	3	6	16,5/19/19

Registro ANVISA: 80208360053

Xcela® Power Injectable PICC				
UPN	Referência	Descrição	Máxima taxa de Fluxo	Diâmetro de Lúmen (G)
Kits de segurança IR com fio 145 cm				
M001456770	45-677	4F, Mono Lúmen, 55 cm	3.5mL/sec	17.0
M001456580	45-658	5F, Mono Lúmen, 55 cm	5mL/sec	15.5
M001456720	45-672	5F, Duplo Lúmen, 55 cm	4mL/sec	17.5/17.5
M001456680	45-668	6F, Duplo Lúmen, 55 cm	5mL/sec	16.5/16.5

Registro ANVISA: 80208360035

Xcela® Power PICC c/ Válvula PASV				
UPN	Referência	Descrição	Máxima taxa de Fluxo	Diâmetro de Lúmen (G)
Com Fio de Micropunção MST (fio guia de 70cm)				
H9654712B0	45-712B	Mono Lúmen	4 FR	17.0
H9654717B0	45-717B	Mono Lúmen	5 FR	15.5

Registro ANVISA: 80208360055

PICC Xcela® c/ Tecnologia de Válvula PASV foi publicado no DOU - nº do registro 80208360064				
UPN	Referência	Descrição	Máxima taxa de Fluxo	Diâmetro de Lúmen (G)
H96555732B0	55-732B	Duplo Lúmen	5 FR	17,5/17,5
H96555737B0	55-737B	Duplo Lúmen	6 FR	15.5

Todos os nossos Kits contêm:

Cateter PICC, Fita Métrica, Kit Flush (para lavagem do cateter), Mandril, bisturi, Agulha com Sistema de Segurança 21g, Agulha reserva 21G, Fio- Guia com 70 cm, Introdutor com Dilatador, tampas e fixador de cateter.

*Os kits de cateteres PICC Mono lúmen, ainda contêm 2 seringas de 10 ml.

A **Hemocat** possui uma equipe de especialistas clínicos comprometida em dar apoio e treinamento educacional, com objetivo de reforçar as melhores práticas da inserção, cuidados e manutenção de cateteres. Atuamos junto aos profissionais insertadores para a evolução da técnica de estruturação do Time de Acesso Vascular.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE RISCO

PICC XCELA com tecnologia de válvula PASV

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES PARA USO: O PICC Xcela com tecnologia de válvula PASV é indicado para o acesso periférico de curto ou de longo prazo ao sistema venoso central para terapia intravenosa, incluindo, mas não se limitando a, administração de fluidos, nutrientes e medicamentos, coleta de sangue e injeção automática de meios de contraste.

CONTRAINDICAÇÕES: Trombose venosa em qualquer parte da veia a ser cateterizada. Condições que impeçam o retorno venoso da extremidade, como paralisia ou linfedema pós-mastectomia. Condições ortopédicas ou neurológicas que afetem a extremidade. Antecipação ou presença de enxertos para diálise ou outros dispositivos intraluminais. Hipercoagulopatia, a menos que tenha ficado determinado colocar o paciente em terapia de anticoagulação. Pré-existência de infecção superficial ou subcutânea da pele no ou perto do local onde se pretende inserir o cateter. Distorsão anatômica das veias devido à cirurgia, lesão ou trauma. Veias antecubitais inadequadas. Irregularidades anatômicas (estruturais ou vasculares) que possam comprometer a inserção do cateter ou os procedimentos de cuidados ao cateter. Pacientes com alergia a adesivo ou esparadrapo.

ADVERTÊNCIAS: Devido ao risco de exposição a agentes patogênicos transmitidos pelo sangue, os profissionais da área de saúde devem observar as diretrizes para medidas de precaução universais no contato com sangue e fluidos corporais durante o cuidado com todos os pacientes. A técnica asséptica deve ser respeitada rigorosamente durante qualquer manuseio do dispositivo. Os componentes são fornecidos esterilizados por óxido de etileno e se destinam a ser usados em apenas um paciente. Não utilizar se a barreira estéril estiver danificada. Não utilizar se o produto estiver danificado. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar; se o fizer poderá comprometer a integridade do dispositivo e/ou levar à falha do dispositivo, o que, por sua vez, pode resultar em lesão, doença ou morte do paciente; pode ainda criar um risco de contaminação, infecção no paciente ou infecção cruzada, o que pode levar à lesão, doença ou morte do paciente. Não inserir o cateter no átrio direito ou no ventrículo direito do coração. Não tentar aparar o cateter com o fio-guia ou o estilete pré-carregado no cateter, pois o estilete ou o fio-guia podem ficar danificados, resultando em lesão do paciente. A incapacidade de aquecer o meio de contraste à temperatura corporal antes da injeção automática pode resultar em falha do cateter. A incapacidade de assegurar a patência do cateter antes da tentativa de injeção automática pode resultar em falha do cateter. A funcionalidade de limitação da pressão no injetor automático (corte de segurança) pode não impedir o excesso de pressurização de um cateter ocluído. Exceder a taxa máxima admissível de fluxo (de acordo com as Instruções de Utilização) pode resultar em falha do cateter e/ou em deslocamento da ponta do cateter. A indicação do cateter relativa à injeção automática de meios de contraste implica que o cateter tenha a capacidade para suportar esse procedimento, mas não implica a adequação do procedimento a um paciente específico. Um médico treinado é responsável por avaliar o estado de saúde do paciente com relação a um procedimento de injeção automática. A pressão máxima dos injetores automáticos utilizada em um PICC Xcela com tecnologia de válvula PASV não pode exceder 325 psi. Exceder a taxa máxima admissível de fluxo pode resultar em falha do cateter e/ou em deslocamento da ponta do cateter. Em cateteres de triplo lúmen, apenas o lúmen roxo é indicado para injeção automática. Não utilizar o lúmen com a marcação "No CT" para injeção automática de meio de contraste, pois pode resultar em danos para o cateter ou lesão do paciente.

PRECAUÇÕES: Não inserir a ponta reforçada do fio-guia de ponta flexível na veia. Acetona e unguentos contendo polietilenoglicol não devem ser utilizados com cateteres de poliuretano, uma vez que estas substâncias podem causar uma falha do dispositivo. Observando as regras operacionais, fixar o cateter do lado externo de forma segura para evitar deslocamento, migração, danos, dobras ou oclusão do cateter. Recomenda-se que os protocolos operacionais sejam observados em todos os aspectos da utilização do cateter, de acordo com as instruções fornecidas neste documento, incluindo a lavagem ("flush") de cateteres ocluídos e injeção automática. Os testes de cateter realizados com o PICC Xcela com tecnologia de válvula PASV incluíram 10 ciclos de injeção automática. Não é aconselhada a utilização de agulha para acesso ao cateter. No entanto, se precisar usar uma agulha, ela não deve ter mais de 1,9 cm, caso contrário pode danificar a válvula. Não voltar a inserir o estilete no cateter, pois pode danificar a válvula, o cateter e a veia. Se um conector sem agulha estiver inserido no canhão do cateter, primeiramente assegurar que ele é ad

* AngioDynamics, o logotipo AngioDynamics, Xcela, PASV, Exact-Length e Navilyst Medical são marcas comerciais e/ou marcas registradas da AngioDynamics, Inc., de uma filial ou subsidiária. © 2013 AngioDynamics, Inc. NAV180 BP Rev 2 01/13

HemoCat

Colocamos nosso coração em tudo o que fazemos.

Hemocat Matriz

Rua Ewerton Visco, 324, 12º Andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA - Brasil - CEP 41.820-022
Tel.: 71 3341-4775

Hemocat - Sudeste

Rua do Paraíso, 441 - Paraíso
São Paulo - SP - CEP 04.103-000
Tel.: 11 3884-7812

E-mail: contato@hemocat.com.br

Site: www.hemocat.com.br

Facebook: /hemocatbrasil

LinkedIn: /company/hemocatbrasil