

1 ANEXO I – MANUAL DE COBERTURAS COMPLETO

1.1 ATADURAS

1.1.1 ALGODAO ORTOPÉDICO

Categoria:	Atadura
Descrição no Tasy	Algodao Ortopédico Esteril
Apresentação	10 cm/ 20cm
Códigos Tasy Nº Referência	46696
Fabricante	Steri Farma
Similar	Oferecer outro tamanho

Composição:

fibras 100% algodão cru, transformada em rolo de manta uniforme.

Ação:

Indicado para para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, goteiras gessadas.

Indicações:

Uso ortopédico para enfaixamento.

Modo de usar:

Aplicar sobre a superfície desejada.

Imagem:



1.1.2 ATADURA CREPE

Categoria:	Atadura
Descrição no Tasy	Atadura Crepe
Apresentação	6cmx4,5mt/ 10cmx4,5mt/15cmx4,5mt
Códigos Tasy Nº Referência	46680/46681/ 46682
Fabricante	Neve
Similar	Oferecer outro tamanho

Composição:

Tecido 100% algodão cru, 13 fios, com características elásticas no sentido longitudinal.

Ação:

Uso ortopédico, ou para fixação de coberturas.

Indicações:

Utilização em terapia compressiva. Aplicações ortopédicas como imobilizações, fixação de curativos. Uso em queimaduras, pois o produto sintético não é absorvido pelo tecido humano .

Modo de usar:

Aplicar sobre a superfície desejada.

Imagem:



1.1.3 ATADURA ELÁSTICA

Categoria:	Atadura
Descrição no Tasy	Atadura Elástica
Apresentação	05cm X 2,2mt /10cm x 2,2mt/ 15cm x 2,2mt/ 20cm x 2,2mt
Códigos Tasy Nº Referência	46686/ 46687/ 46688/ 46689 H00410/ H00405/ H00415/ H00420
Fabricante	Cremer
Similar	Oferecer outro tamanho

Composição:

É confeccionada em tecido sintético misto.

Ação:

A sua composição e estrutura conferem ao produto um perfeito amoldamento nas áreas que se faz necessário enfaixar, permanecendo no lugar, sem limitar a liberdade de movimentos. A atadura elástica é macia, evitando irritações na pele.

Indicações:

Uso ortopédico, para fixação de coberturas ou compressão

Modo de usar:

Aplicar sobre a superfície desejada.

Imagem:



1.2 COBERTURAS ABSORVENTES

1.2.1 GAZE

Categoria:	Cobertura absorvente
Descrição no Tasy	Gaze Hidrófila 13 fios Esteril
Apresentação	7,5 x 7,5cm
Códigos Tasy Nº Referência	45811 24013/166460
Fabricante	Cremer
Similar	Substituir pela marca NEVE

Composição:

Tecido tipo tela com fios 100% algodão com ou sem filamento radiopaco.

Ação:

Camada de algodão tem como função absorver sangue e exsudato.

Indicações:

Para procedimentos invasivos, Limpeza e cobertura de curativos em geral, absorção de sangue e exsudatos, como cobertura secundária.

Modo de usar:

O produto não é reutilizável, colocado conforme indicação.

Imagem:



1.2.2 GAZE – ZOBEC

Categoria:	Cobertura absorvente
Descrição no Tasy	Compressa Gaze Zobec Esteril
Apresentação	15x10cm
Códigos Tasy Nº Referência	45812
Fabricante	Cremer
Similar	Substituir pela marca Medhouse

Composição:

É constituído por uma manta de algodão hidrófobo (não absorvente) isento de impurezas e por uma manta de algodão hidrófilo (absorvente) branca, ambas envoltas por um tecido de gaze hidrófila.

Ação:

A camada de algodão hidrófilo tem como função absorver sangue e exsudatos, enquanto a camada de algodão hidrófobo tem o objetivo de evitar a passagem de secreções, dando melhor aparência aos curativos e propiciando maior conforto ao paciente.

Indicações:

Trata-se de um curativo de cobertura. Portanto, abaixo dele é que estará o tratamento da ferida. Indicado para curativos com alto exsudato.

Modo de usar:

Deve ser colocado com a parte hidrófila (branca) em contato com o paciente.

Imagem:



1.2.3 BIATAIN SILICONE LITE

Categoria:	Cobertura absorvente
Descrição no Tasy	Curativo de Espuma Biatain Silicone Lite
Apresentação	10cm x 10cm/ 7,5cm x 7,5cm
Códigos Tasy Nº Referência	267077/ 267078 33445/ 33444
Fabricante	Coloplast
Similar	Mepilex border lite

Composição:

Cobertura de espuma de poliuretano, estéril, apresentando um adesivo suave de silicone

Ação:

A camada de silicone suave e perfurada permite uma maior absorção do exsudato e uma camada lock away que aprisiona o exsudato da ferida ajudando na sua absorção e retenção transformando-o em gel. Com uma película permeável a vapor, mas à prova de bactérias e água.

Indicações:

Indicado para cicatrização de feridas em meio úmido e controle do exsudato, incluindo úlceras de pernas, úlceras por pressão, úlceras de pé diabético não infectadas, áreas doadoras de pele, abrasões e feridas pós-operatórias.

Modo de usar:

Lave a lesão, em seguida seque a pele periférica e verifique se não há residuo de material gorduroso ou oleoso que venha a dificultar a adesividade da cobertura secundária e /ou adesivo escolhido. Selecione uma cobertura de maneira que a espuma exceda a borda da lesão por uma distância de 1 a 2 cm, utilize as abas para evitar tocar no ferimento e para garantir uma aplicação asséptica, remova a película protetora central primeiro e coloque a parte de espuma sobre a lesão, em seguida remova a película lateral.

Observações:

Pode permanecer no local aplicado por até 7 dias

Imagem:



1.2.4 MEPILEX

Categoria:	Cobertura absorvente
Descrição no Tasy	Curativo Mepilex Border/ Mepilex
Apresentação	10 x10cm/ 15x 15cm/ 15 x 20cm/ 18 x 18cm/ 23x 23cm/10x10cm /20x20 cm
Códigos Tasy Nº Referência	146997/ 188467/ 194204/ 204941/ 204942/ 187294/185679 295300/ M295400/ M295600/ 282000/ 282400
Fabricante	Molnlycke Health Care
Similar	Não há

Composição:

Mepilex: Produto estéril que consiste de uma almofada absorvente flexível de espuma de poliuretano, e uma película exterior que é permeável ao vapor e à prova d'água.

Mepilex border: um curativo absorvente e flexível em três camadas, uma espuma de poliuretano, uma camada de revestimento não tecido e uma camada com fibras de poliacrilato super absorventes e um filme exterior permeável ao vapor e à prova de água.

Ação:

O Mepilex é um curativo altamente adaptável, que absorve o exsudado e mantém um ambiente úmido no ferimento. O ambiente úmido propicia o desbridamento, poderá haver um aumento inicial no tamanho do ferimento. O Mepilex pode ser cortado para se adequar às diferentes formas e locais de ferimentos. Adere suavemente a superfícies secas, como a pele, mas não em superfícies úmidas, como ferimentos abertos. molda-se aos poros da pele, cobrindo uma maior superfície e espalhando as forças de fricção sobre a remoção, para evitar que a pele sofra descamação.

Indicações:

O Mepilex é indicado para uma ampla variedade de feridas exsudativas e ferimentos de cicatrização secundária, usado também para terapia profilática para evitar danos na pele.

Modo de usar:

Limpar e secar o ferimento, em seguida remova as películas de proteção do curativo e aplique o lado aderente à ferida, não estique. Para obter um melhor resultado, o Mepilex deve sobrepor-se à pele seca ao redor do ferimento por pelo menos 1-2 cm, a fim de proteger a pele ao redor de maceração e escoriação.

Observações:

Pode permanecer no local durante vários dias. Não use o Mepilex juntamente com agentes oxidantes, como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio.

Imagem:



1.2.5 OPSITE POST-OP

Categoria:	Cobertura absorvente
Descrição no Tasy	Curativo Pelic.Ab.Opsite Post-Op /Hidrofilm
Apresentação	25x10cm/ 30x10cm/ 6,5x5cm / 15,5x8,5cm
Códigos Tasy Nº Referência	45483/ 45484/45482/45960 66000714,685779 / 66000715,716,685780/ 66000708/66000712
Fabricante	Smith&Nephew
Similar	Não há

Composição:

Película transparente com poliuretano hidrofílico.

Ação:

A película reage em relação à humidade, eliminando o seu excesso através da evaporação. Absorve o exsudado rapidamente reduzindo o risco de maceração

Indicações:

Feridas exsudativas ou com presença de sangramento, também usado como cobertura secundária.

Modo de usar:

Lavar e secar a zona antes da aplicação do opsite, retirar o papel protetor, colocar o penso aplicando pouca pressão, alisar o penso sobre a mesma.

Imagem:



1.2.6 ALLEVYN

Categoria:	Cobertura absorvente
Descrição no Tasy	Adesivo Hidrocelular Allevyn/ Tracheostomy
Apresentação	12,5x12,5cm/ 7,5x7,5cm/ 09x09cm
Códigos Tasy Nº Referência	125661/112011/112012 66000044/66000043/66007640
Fabricante	Smith&Nephew
Similar	Mepilex border (Monlyncke)

Composição:

Possui uma estrutura avançada trilaminar que combina uma camada hidrocelular absorvente entre uma camada adesiva perfurada de contacto com a ferida e uma película externa à prova de água altamente permeável, que auxilia a prevenir a contaminação bacteriana da ferida.

Ação:

Facilita a gestão dinâmica de fluidos de modo a proporcionar um ambiente ótimo para a ferida que promova a cicatrização e ajude a minimizar o risco de maceração. A película exterior auxilia na prevenção da penetração bacteriana e de fluidos.

Indicações:

Para feridas exsudativas de moderado a abundante e modelo com abertura Key-Hole para ajuste em traqueostomia ou drenos.


Modo de usar:

Limpe a ferida e remova o excesso de humidade, selecione o tamanho adequado e aplique o produto.

Observações:

A troca deve ser feita quando o curativo estiver saturado ou por até 7 dias

Imagem:

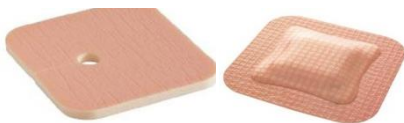

1.3 CURATIVOS

1.3.1 STERI STRIP

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Sutura Pele Steri Strip
Apresentação	12x100mm/ 6 x 100 mm
Códigos Tasy Nº Referência	45631/ 45632 1547/15460333
Fabricante	3M
Similar	Não há

Composição:

Steri-Strip é de material elástico, poroso, com reforço de filamentos para maior durabilidade, revestidas com adesivo hipoalergênico.

Ação:

Usado para a união dos bordos, em lacerações e incisões cirúrgicas. As tiras são feitas para permitir movimento e qualquer expansão que venha a ocorrer nos tecidos.

Indicações:

Podem ser usadas simultaneamente à sutura com pontos ou, após a remoção destes, para maior apoio

Modo de usar:

Limpar e secar a pele, podendo utilizar uma fina camada de tintura de benzoila na superfície para aumento de adesão da fita. Juntar as bordas da pele com os dedos ou pinças, colocar as fitas de um lado para o outro. Em ferimentos maiores podendo colocar com espaço entre elas de 3 mm.

Observações:

Não aplicar as tiras adesivas sob tensão. Dano da pele, bolhas ou falta de adesão podem ocorrer caso ocorra tensão excessiva.

Contra indicado em edema pós- operatório, feridas infectadas, peles com exsudado, oleosa com umidade ou pelos, com dificuldade de adesão da mesma. Pode causar laceração durante a retirada.

Imagem:



1.3.2 BIATAIN ALGINATO/ SEASORB

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Biatain Alginato Cobertura
Apresentação	10x10 cm/ 3x44cm
Códigos Tasy Nº Referência	45874/ 45872 3710,999595/ 3740
Fabricante	Hartmann
Similar	Sorbalgon(Hartmann)

Composição:

Sorbalgon é uma compressa ou tira para preenchimento composto por fibras de alginato de cálcio e polisorbato.

Ação:

Em contato com os sais de sódio presentes no exsudado da ferida, as fibras de alginato transformam-se em gel. Proporciona um ambiente húmido, favorecendo a cicatrização natural da ferida.

Devido às propriedades das fibras de alginato, a compressa tem um elevado poder de absorção, o que é particularmente importante para o tratamento de feridas de moderada a altamente exsudativas. O produto adapta-se aos contornos e formas difíceis da ferida e diminui a secagem para o tratamento de feridas com cavidade, deverá utilizar-se as tiras de preenchimento.

Indicações:

Para todas as feridas de moderada a altamente exsudativas ou sangrantes.

Modo de usar:

Limpar a ferida e em seguida colocar a compressa ou preencher a ferida com tiras do penso, e fixar com uma ligadura ou cobertura apropriado. Em feridas secas o penso pode ser previamente humedecido.

Observações:

O produto pode permanecer mais dias na ferida conforme a quantidade de exsudado. A compressa deverá ser mudada quando estiver completamente transformada em gel. As fibras que eventualmente tenham ficado na ferida e/ou biologicamente decompostas pelo corpo podem ser retiradas com uma solução de limpeza.

Imagem:



1.3.3 GAZE DE RAYON PIELSANA

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Gaze de rayon embebida c/ óleo AGE Piel sana
Apresentação	Penso 7,5cm x 7,5cm
Códigos Tasy Nº Referência	255459
Fabricante	DBS
Similar	Curativo não aderente com AGE (CURATEC)

Composição:

Óleo a base de AGE (ácidos graxos essenciais), [oleo de girassol triglicerideos de cadeia média, lecitina de soja, vitamina A e E, óleos de copaíba e melaleuca.

Ação:

Revitaliza a pele e auxilia no processo de cicatrização de feridas.

Indicações:

Previne e trata feridas agudas e crônicas mesmo com perda de tecido superficial ou parcial.

Modo de usar:

Após limpeza com soro fisiológico aplique a gaze de rayon embebida em óleo pielsana sobre a região lesionada.

Observações:

Manter por até 72h.

Imagem:



1.3.4 PIELSANA GEL

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Gel dermoprotetor a base de AGE Pielsana
Apresentação	Tubo 50gr
Códigos Tasy Nº Referência	255460
Fabricante	DBS
Similar	Dersani hidrogel

Composição:

Gel a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais), vitaminas A e E, Lencitina de soja, óleos de copíba e melaleuca.

Ação:

Revitalizam a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas, hidrata e mantém a integridade da pele.

Indicações:

Para o tratamento de feridas agudas e crônicas mesmo com perda de tecido superficial ou parcial, usado também para prevenção de úlceras por pressão.

Modo de usar:

Aplicar o produto após a limpar e secar a pele..

Imagem:



1.3.5 MESALT

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Mesalt
Apresentação	Penso - 7,5 x 7,5cm
Códigos Tasy Nº Referência	243743 M285780
Fabricante	Molnlycke Health Care
Similar	Não há

Composição:

Consiste em um material não tecido macio impregnado com cloreto de sódio

Ação:

Absorve o exsudado da ferida e o cloreto de sódio é liberado. O Mesalt torna-se hipertônico e, por conseguinte, o exsudado, as bactérias e o material necrótico é absorvido, facilitando o processo de cura da ferida natural.

Indicações:

É indicado para feridas não infectadas com um elevado nível de exsudado, tais como feridas superficiais ou de cavidade e fístulas.

Modo de usar:

Limpar a área da ferida e desbridar qualquer excesso de tecido necrótico ou escaras, secar a pele circundante, mas não secar a superfície da ferida, aplicar o mesalt na ferida.

Observações:

O mesalt deve ser mudado quando estiver saturado. Não deve ser utilizado em feridas secas, não utilizar quando em contato com ossos ou tendões.

Imagem:



1.3.6 COMFEEL PLUS

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Hidroativo Transparente- Comfeel Plus
Apresentação	9x14cm
Códigos Tasy Nº Referência	45873 / 136134 3536 / 3542
Fabricante	Coloplast
Similar	Duoderm extra thin

Composição:

Consiste em partículas de carboximetilcelulose de sódio, que absorvem umidade, encapsuladas em uma massa sintética, elástica e pegajosa. A película superior é um filme de poliuretano semipermeável.

Ação:

O curativo hidrocoloide Comfeel Plus Transparente é a solução fina e flexível para selagem e cicatrização de feridas pouco ou não exsudativas.

Indicações:

Pode ser usado no tratamento de feridas crônicas pouco ou não exsudativas e em feridas agudas superficiais nos estágios finais da cicatrização. Comfeel Plus Transparente pode ser usado para queimaduras superficiais, queimaduras superficiais de espessura parcial, áreas doadoras, feridas pós-operatórias e abrasões na pele.

Modo de usar:

Aplicar sobre a ferida. Quando o curativo fica em contato com o exsudato da ferida, forma-se um gel viscoso, que absorve o exsudato, mas não adere à ferida. O curativo pode permanecer sobre a ferida durante até 7 dias.

Imagem:



1.3.7 DUODERM HIDROCOLÓIDE

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Hidrocoloide Duoderm com Borda / Extra Fino
Apresentação	Placa - 10x13cm/ 10x10cm/ 10x05cm/ 15x18cm
Códigos Tasy Nº Referência	45997/ 45925/ 45927/ 45998 925, 187973 / 3213,900938 / 891, 187900/ 926,187974,1197982
Fabricante	Convatec
Similar	Não há

Composição:

Fórmula de gel controlada, é um curativo adesivo (hidrocolóide) de contato. Os hidrocolóides estão contidos dentro da matriz de polímeros elastoméricos e sobre esta há uma camada de espuma de poliuretano.

Ação:

O curativo auto-aderente absorve o exsudato e promove um ambiente úmido que favorece o processo de cicatrização e auxilia na remoção de tecido desvitalizado da ferida (debridamento autolítico) sem danificar o tecido recém-formado. É um curativo adesivo estéril, hidrocolóide, com fórmula de controle de gel. Os hidrocolóides possuem a capacidade de conter o exsudato formando um gel coesivo e sobre esta há uma camada de espuma de poliuretano. Age como barreira para a ferida contra a passagem de bactérias e outras contaminações externas enquanto o curativo permanecer íntegro.

Indicações:

Indicado para o tratamento de lesões superficiais, secas ou ligeiramente exsudativas, tais como abrasões, lacerações, cortes superficiais, queimaduras, rachaduras de pele e entre outras.

Modo de usar:

Remova o papel no verso do curativo, com cuidado para minimizar o contato dos dedos com o curativo, verifique se o tamanho do curativo a ser aplicado excede a ferida em pelo menos 3cm, em seguida segure o curativo sobre a ferida, alinhando o centro do curativo com o centro da ferida, cuidadosamente coloque o curativo sobre a ferida, modele o curativo adequadamente na ferida, fixe as bordas do curativo com adesivo hipoalergênico se desejar segurança extra.

Observações:

O curativo deve ser avaliado com frequência para verificar se há vazamento ou desprendimento das bordas. Se alguma destas situações ocorrer o curativo deve ser trocado. O tempo de uso recomendado é de até 7 dias.

Imagem:



1.3.8 HYDROSORB

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Hidrogel Hydrosorb
Apresentação	10cm x 10cm
Códigos Tasy Nº Referência	202400 900854
Fabricante	Hartmann
Similar	Não há

Composição:

O Hydrosorb é revestido com uma cobertura de poliuretano sempermeável permitindo as trocas gasosas, impermeável a líquidos e bactérias. Contém um rebordo de fixação adesiva revestido com adesivo acrílico.

Ação:

Produz humidade e absorve o exsudado. Proporcionando um ambiente húmido que tem um efeito estimulante na cicatrização da ferida. É transparente, não adere a ferida e não deixa resíduos. Permite uma avaliação visual sem a remoção do produto.

Indicações:

Recomendado para o tratamento de feridas na fase de granulação e de epitelização sem ou com exsudado moderado. Para o tratamento húmido de feridas, especialmente para o tratamento de feridas não infecciosas clinicamente durante a fase de granulação e epitelização, promove a repitalização da pele, para cobertura de zonas de onde foram retirados excertos de pele, depois que o sangramento estiver parado.


Modo de usar:

Escolher o tamanho do produto de forma que exceda os bordos da ferida em cerca de 1 à 2 cm, retirar a película de proteção azul do lado que entra em contato com a ferida, colocar o Hydrosorb e pressionar firmemente os bordos para fixação.

Observações:

O produto contém uma película transparente que permite efetuar anotações. Pode permanecer na ferida por até 7 dias. A absorção do exsudado da ferida é visível por uma opacificação ou formação de bolhas, caso a bolha atinja a dimensão da superfície da ferida a cobertura deve ser trocada.

Imagem:

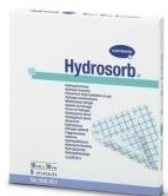

1.3.9 ADAPTIC RAYON

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Adaptic N/Ard.Rayon C/Petrolatum
Apresentação	7,5x20,0cm/ 7,6x7,6 cm/ 7,6x40cm
Códigos Tasy Nº Referência	45842/45841/45845 2013/ 2012/ 2014
Fabricante	Systagenix
Similar	Curativo não aderente com petrolatum (CURATEC)

Composição:

Malha não aderente de acetato de celulose impregnada com uma emulsão à base de petrolato.

Ação:

Ajuda a proteger a ferida, evitando a aderência da cobertura no leito, ajuda a proteger tecidos em regeneração e minimiza a dor e o trauma nas trocas da cobertura. Ajuda a evitar acúmulo de exsudato no leito pois o exsudato passa facilmente através da malha para a cobertura secundária. Pode ser cortado do tamanho da ferida.

Indicações:

Indicado para feridas desde secas a altamente exsudativas para evitar a aderência da cobertura no leito da ferida e o acúmulo de exsudato.

Modo de usar:

Limpe a ferida, corte a cobertura e coloque diretamente no leito da ferida, e cubra com uma cobertura secundária, pode permanecer por vários dias. Pode ser cortado do tamanho da ferida.

Imagem:



1.3.10 PAPAINA GEL 8%

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Papaina Gel 8%
Apresentação	Frasco gel
Códigos Tasy Nº Referência	259450
Fabricante	Manipulado em laboratório
Similar	Não há

Composição:

É composta por enzimas proteolíticas e peroxidases: papaína, quimiopapaína A e B e papayapectidase.

Ação:

Seu mecanismo de ação atua como desbridante químico, facilitando o processo cicatricial. Tem ações bacteriostáticas, bactericidas e anti-inflamatórias. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, promovendo crescimento tecidual uniforme.

Indicações:

Indicado como desbridante químico e facilitador do processo cicatricial e como coadjuvante da antibioticoterapia sistêmica de feridas infectadas.

Modo de usar:

Colocado no leito da ferida e utilizar uma cobertura secundária. Na presença de necrose de coagulação, utilizar após efetuar a escarectomia. A substituição do curativo é indicado, em média, a cada 12 horas.

Imagem:



1.3.11 GELFOAM

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Esponja Gelatina Gelfoam Absor.Esteril
Apresentação	80x125x10mm
Códigos Tasy Nº Referência	45849
Fabricante	Pfizer
Similar	Não há

Composição:

É uma esponja hemostática de gelatina estéril absorvível, insolúvel em água, feito a partir de gelatina de pele de porco purificada.

Ação:

E capaz de absorver até 45 vezes o seu peso em sangue. A capacidade absorvível da gelatina é dada em função do seu tamanho físico, aumentando proporcionalmente ao aumento do tamanho da esponja de gelatina.

Indicações:

Gelfoam é indicado em procedimentos cirúrgicos, como auxiliar na obtenção de hemostasia quando o controle do sangramento por ligadura ou procedimentos convencionais é ineficaz ou impraticável.

Modo de usar:

Utilize-se de técnica estéril, Gelfoam deve ser cortado no tamanho desejado (espessura, comprimento e largura) e utilizado na menor quantidade necessária para obtenção da hemostasia. Quando utilizado a seco, deve ser comprimido antes da aplicação. Quando utilizado com solução salina, deve ser imerso na solução, retirado, espremido entre os dedos enluvados para remover as bolhas de ar presentes nas malhas, e recolocado na solução salina, e aí deixado até ser necessário. A gelatina deve retornar ao seu tamanho e formato originais quando reimersa na solução salina. Mantenha a esponja no local com pressão moderada até que seja obtida a hemostasia. Em geral, a esponja de gelatina estanca a hemorragia na primeira tentativa, caso contrário, deve-se fazer uma aplicação adicional utilizando-se novos pedaços de esponja. Estancada a hemorragia, os pedaços de Gelfoam devem ser deixados no local, caso contrário a hemorragia poderá recomeçar.

Observações:

Por absorver fluido, pode se expandir em tamanho e comprimir estruturas vizinhas. Portanto, quando colocado em cavidades ou espaços tissulares fechados, recomenda-se uma compressão mínima preliminar do produto, além de cuidados para evitar a expansão excessiva.

Imagem:



OPSITE FLEXIGRID

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Pelic.Ades.Opsite Flexigrid
Apresentação	Penso - 10x12cm/ 15x20cm
Códigos Tasy Nº Referência	45961/45963 4630/ 4631
Fabricante	Smith&nephew
Similar	IV 3000

Composição:

É uma película transparente e adesiva com acrílico.

Ação:

É uma película transparente e adesiva, impermeável à água, adaptável a qualquer zona e extensível, promove a cicatrização em ambiente húmido. Retem o exsudado natural que contém nutrientes vitais necessários para o crescimento de células e glóbulos brancos para prevenir infecções. A evaporação do excesso de humidade diminui o risco de maceração da pele.

Indicações:

Ideal para ser utilizado como penso secundário e como profilaxia de úlceras por pressão. E em feridas superficiais, como queimaduras, cortes e abrasões.

Modo de usar:

Lavar e secar a zona antes da aplicação de Opsite Flexigrid. Caso seja necessário deve-se limpar e proteger a pele circundante. Retirar o papel e situar o penso sobre a lesão e alisar com a mão para conseguir uma boa aderência, exercendo uma suave pressão nesta zona.

Observações:

É extensível e adaptável, que combinado com a sua elevada permeabilidade à evaporação da humidade. O penso possa permanecer durante até 14 dias.

Imagem:



1.3.12 EXCILON

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo C/Antimicrobiano Excilon
Apresentação	Penso 5cm x 5cm
Códigos Tasy Nº Referência	196279 7089
Fabricante	Covidien
Similar	Não há

Composição:

Poli-hexametilenobiguanida (PHMB) 0,2%.

Ação:

Excilon Elimina as bactérias existentes e reduz as infecções. Ajuda a resistir à colonização bacteriana. Cobertura fenestrada com melhor adaptabilidade; Não aderente, reduzindo o trauma no momento da retirada.

Indicações:

É indicado em incisões cirúrgicas, lacerações, abrasões, queimaduras, locais de cateteres, gastrostomia, traqueostomia, jejunostomia, inserções de drenos e cateteres, locais de inserção de fixadores externos.

Modo de usar:

Limpar e secar a área, e aplicar o excilon na região desejada.

Observações:

Troca do penso em até 72h.

Imagem:



1.3.13 CARVÃO ATIVADO COM PRATA - ACTISORB PLUS

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo de carvão ativado c/ prata Actisorb Plus
Apresentação	Penso - 10,5 x 10,5cm/ 19,0 x 10,5cm
Códigos Tasy Nº Referência	45906/ 45904 Map105/ Map190
Fabricante	Systagenix
Similar	Curativo de carvão ativado com prata (Curatec)

Composição:

Curativo de carvão ativado com prata não Recortável é composto por um envoltório de não tecido e um tecido de carvão ativado impregnado com 25 µg/cm² de prata.

Já o Carvão Ativado com Prata Recortável é constituído por uma camada de rayon viscosa carbonizada e ativada, impregnada com prata, prensada entre duas camadas de rayon viscosa.

Ação:

A camada de carvão ativado adsorve as bactérias, removendo-as eficazmente do leito da lesão, resultando em um efetivo controle do odor em feridas com odor fétido. A prata impregnada no tecido de carvão exerce efeito bactericida sobre os micro-organismos, auxiliando no controle de infecção da ferida.

Indicações:

É indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável.

Modo de usar:

Irrigar o leito da ferida com SF 0,9%, em seguida secar somente região periférica, aplicar carvão ativado com prata sobre a ferida, tendo melhor capacidade absorvente quando usado diretamente em contato com a lesão, ocluir com cobertura secundária absorvente, manter cobertura até saturamento da mesma, ou mantendo no máximo até 7 dias.

Observações:

Não secar o leito da ferida, pois este procedimento pode causar trauma ao tecido de granulação.

Curatec Curativo de Carvão Ativado com Prata (sachê) é um curativo primário que e não pode ser cortado, pois as partículas de carvão ativado podem entrar na ferida e provocar descoloração.

Já o penso em forma de manta pode ser recortada, com mesmo método de utilização.

Imagem:



1.3.14 ATRAUMAN AG

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo de espuma c/ prata Atrauman Ag
Apresentação	10x10cm/ 10 x 20cm
Códigos Tasy Nº Referência	226746/ 215057 499573/ 499575
Fabricante	Heartmann
Similar	Actcoat flex (Smith Nephew)

Composição:

Atrauman Ag é uma compressa de tule, não aderente, com ação antimicrobiana, estéril, composta por filamentos de poliamida em forma de malha hidrófoba, revestida com íons de prata e impregnada por pomada hidrófila de triglicerídeos (ácidos graxos).

Ação:

Os íons de prata do curativo Atrauman Ag são liberados de forma sustentável através do mecanismo “touch and kill”, ou seja, sua ação antimicrobiana se concentra somente na área e na superfície da lesão. Pode também ser recortado e utilizado em feridas cavitárias. Usado como complemento no tratamento de feridas que apresentam quantidade excessiva de germes e na profilaxia suplementar de infecções em feridas infectadas. Atrauman Ag é efetivo contra um grande número de bactérias gram-positivas, e bactérias gramnegativas. A ação dos ácidos graxos em sua composição auxiliam na proteção das bordas da ferida, ajudando a prevenir a maceração. Não contém princípios ativos ou medicamentos portanto não deixa resíduos quando da troca.

Indicações:

Atrauman Ag é próprio para uso complementar no tratamento de feridas infectadas ou feridas que apresentam alta contaminação bacteriana. Atrauman Ag também é indicado como profilaxia contra infecção no tratamento de feridas e no pós-cirúrgico.

Modo de usar:

realize a limpeza da ferida conforme indicação da mesma e em seguida coloque Atrauman Ag, que é fino, macio, permeável, podendo ser recortado garantindo bom contato com o leito, sem, contudo, aderir à ferida e propiciando remoção indolor, indicado uso de cobertura secundária para absorção de secreções. Pode permanecer no leito da ferida por até 7 dias.

Imagem:



1.3.15 AQUACEL COM PRATA

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo de Hidrofibra Antimicrobiano com Prata Aquacel
Apresentação	Penso -10cm x 10cm
Códigos Tasy Nº Referência	146687 403708
Fabricante	Convatec
Similar	Actcoat absorvent (Smith Nephew)

Composição:

Aquacel é um curativo de hidrofibra, estéril, macio, não entrelaçado, composto por fibras de carboximetilcelulose sódica e prata iônica.

Ação:

Aquacel Ag com prata é encontrado na forma de placa ou fita. A prata presente no curativo inativa as bactérias retiradas do leito da ferida e retidas dentro da fibra do curativo, promovendo uma barreira antimicrobiana que protege o leito da ferida.

Este curativo absorve grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, formando um gel macio e coeso, que se adapta à superfície da ferida formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico). O ambiente de cicatrização em meio úmido ao redor da ferida e o controle do número de bactérias contribuem com o processo de cicatrização do próprio organismo e ajudam a reduzir o risco de infecção da ferida.

Indicações:

Usado no tratamento de feridas exsudativas e infectadas.

Modo de usar:

Limpar a área ao redor da ferida com uma solução de limpeza apropriada. Aplicar o curativo sobre a ferida mantendo 1 cm de borda ao redor da ferida. Em feridas cavitárias, aplicar Aquacel fita mantendo 2,5 cm de fita para fora da cavidade, a fim de facilitar a remoção. Somente preencha o espaço em feridas profundas até 80% do volume, uma vez que Aquacel sofrerá expansão preenchendo os espaços da lesão quando entrar em contato com o exsudato da ferida. Cobrir o Aquacel com um curativo secundário apropriado.

Observações:

Remover Aquacel em até 7. Se necessário, umedecer com solução salina estéril para facilitar a remoção. É possível ocorrer pequenos pontos de sangramento devido à estimulação da neoangiogênese em meio úmido.

Imagem:



1.3.16 COBAN BANDAGEM ELASTICA

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Coban Bandagem Elastica
Apresentação	Rolo
Códigos Tasy Nº Referência	46220
Fabricante	3M
Similar	Não há

Composição:

Emulsão de resina acrílica, fibra de poliéster, copolímero de borracha sintética, fio de spandex poliéster-uretano, pigmento e óxido de zinco.

Ação:

Mantém compressão uniforme ao longo do tempo, adere sobre si mesma sem necessitar de grampos ou fitas adesivas, conforma-se rapidamente aos contornos do corpo.

Indicações:

Uso para compressão e fixar curativos e dispositivos.

Modo de usar:

Desenrole cerca de 30 cm, sem estica-la aplique uma volta completa e sobreponha. Pressione a área sobreposta levemente para que a extremidade final permaneça no local, continue o enfaixamento, aplicando tensão sobre o enfaixamento anterior somente para obter a compressão desejada. Quando o enfaixamento estiver terminado, rasgue o excesso de coban, aplicando ao final uma ligeira pressão.

Cuidados especiais:

Não adere à pele, cabelo, roupas, lençóis ou campos, fácil de aplicar, reposicionar ou remover, livre de látex, não provoca alergia. Pode ser mantido por até 7 dias sem escorregar nem garrotear.

Imagem:



1.3.17 SAFIGEL

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo De Gel Hidroativo Safigel
Apresentação	Tubo 85Gr
Códigos Tasy Nº Referência	45814 145730
Fabricante	Convatec
Similar	Hidrogel (Curatec)

Composição:

composto por água purificada, propilenglicol, carbomero 940, trietanolamina, ácido bórico, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, DMDM hidantoína e carboximetilcelulose sódica.

Ação:

É um gel hidratante e absorvente para feridas, não estéril, transparente e viscoso. Ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida.

Indicações:

É indicado no tratamento de diferentes lesões, entre elas no controle de úlceras crônicas, incluindo úlceras de pressão de estágio IV.

Modo de usar:

Limpar a ferida, secar a pele adjacente, e aplicar diretamente dentro da ferida. Não exceder o nível da pele ao redor da ferida. Recomendado uso contínuo com curativo que secundário absorvente.

Observações:

Deverá ser trocado diariamente ou quando o curativo que recobre a ferida começar a saturar, o gel deve ser removido enxaguando-se com solução salina.

Imagem:



1.3.18 FIBRACOL

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Fibracol Plus
Apresentação	10,2cm x 11,1cm
Códigos Tasy Nº Referência	112019 2982
Fabricante	Systagenix
Similar	Não há

Composição:

Composto de colágeno e de alginato de cálcio

Ação:

Sua combinação de colágeno e alginato formam uma cobertura protetora tópica esteril, mácia, absorvente e é adaptável. Na presença do exsudato da ferida, mantém um microambiente fisiológico úmido na superfície da ferida levando a formação do tecido de granulação e epitelização, permitindo uma cicatrização mais rápida.

Indicações:

Indicado para o tratamento de feridas exsudativas.

Modo de usar:

Realizar a limpeza da ferida, remover excesso de humidade em torno da ferida. Aplicar diretamente no leito. Para feridas com pouco exsudado aplique o produto no leito umedecido com soro fisiológico, para que inicie o processo de formação do gel.

Observações:

Realizar troca de 2 a 4 dias ou sempre que necessário. Pode ser cortado e dobrado.

Imagem:



1.3.19 OPSITE FLEXIFIX GENTLE

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Opsite flexifix gentle
Apresentação	Rolo 10cm x 5m
Códigos Tasy Nº Referência	273214 66801197
Fabricante	Smith&Nephew
Similar	Não há

Composição:

Filme transparente adesivo não estéril em rolo

Ação:

É uma película altamente flexível, facilmente adaptável a áreas de contorno do corpo. É impermeável à água e bactérias e permeável ao oxigênio e aos vapores húmidos, permitindo uma correta cicatrização. Contém um adesivo acrílico que minimiza o risco de trauma na remoção do penso, especialmente após utilização prolongada. Complementada por suporte quadriculado, que permite a medição da ferida de forma simples e precisa, facilitando a observação do processo de cicatrização.

Indicações:

Indicado na fixação de curativos e tubos, proteção da pele e para colocação sobre bolsas de ostomia.

Modo de usar:

Recorte o penso do tamanho desejado e utilize conforme indicado.

Observações:

Não utilize diretamente sobre feridas, pele rachada ou locais de inserção de cateter.

Imagem:



1.3.20 INTRASITE GEL

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Intrasite Gel
Apresentação	Aplicador 15gr
Códigos Tasy Nº Referência	45926 7311/7313
Fabricante	Smith&Nephew
Similar	Purilon (Coloplast)

Composição:

É um hidrogel amorfo, transparente, composto por um polímero modificado de carboximetilcelulose (2,3%), propilenoglicol (20%) e água (77,7%).

Ação:

IntraSite Gel reidrata o tecido necrótico para atuar rapidamente e, geralmente sem dor, o desbridamento no início do tratamento das feridas abertas. Durante esta fase a troca diária é recomendada para acelerar a remoção do tecido necrótico e então proceder à regeneração da ferida.

Remove o esfácelo sem traumatizar o tecido saudável durante a fase inflamatória da cicatrização. Por absorver o excesso de exsudato da ferida, o gel previne o desenvolvimento de restos celulares que causam a formação do esfácelo. Previne a formação da escara por manter o tecido de granulação úmido, permitindo a migração das células epiteliais. Viabiliza o rápido e seletivo desbridamento do tecido necrótico, além de absorver esfácelo e excesso de exsudato. Pode também ser usado para propiciar um meio úmido durante as fases de granulação e epitelização, tornando-o ideal para todas as fases do processo de cicatrização.

Indicações:

IntraSite Gel está indicado para o tratamento de feridas superficiais e profundas.

Modo de usar:

Aplicador de sistema único que direciona e controla a aplicação do gel homogeneamente em locais desnivelados da ferida. Durante a remoção e frequência de trocas do curativo dependerá da quantidade de exsudato presente, mas geralmente pode ser realizada diariamente para agilizar a limpeza.

Observações:

Devido ao fato do gel não ser aderente, a limpeza não provocará danos no tecido de granulação nem causará desconforto para o paciente.

Imagem:



1.4 CURATIVO PARA CATETER

1.4.1 OPSITE IV 3000

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Curativo Pelic.P/Catet.Opsite Iv 3000
Apresentação	10x12cm
Códigos Tasy	45487
Nº Referência	4008
Fabricante	Smith&Nephew
Similar	Tegaderm

Composição:

Constituído por uma película transparente reactivo à humidade.

Ação:

O Curativo Opsite IV3000 possui barreira viral e bacteriana, proporciona uma aplicação asséptica rápida e fácil, oferecendo um local de inserção seco.

Indicações:

Adequado para a fixação de cateteres.

Modo de usar:

Usar somente em pele seca. Remova o protetor plástico de suporte levantando a ponta não adesiva, puxando-a na diagonal até sua total remoção, e aplique na região desejada.

Imagem:



1.4.2 TEGADERM COM CHG

Categoria:	Curativo para cateter
Descrição no Tasy	Curativo Tegaderm CHG
Apresentação	10x 12cm/ 8,5 x 11,5cm
Códigos Tasy Nº Referência	236064/ 194371 1658R/ 1657R
Fabricante	3M
Similar	Não há

Composição:

Filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo e um pad em gel integrado. O pad é composto por gluconato de clorexidina (2%), triglicerol, polivinil pirrolidona reticulado, goma hidroxipropil, glucona lactona.

Ação:

O filme transparente estéril proporciona uma barreira para contaminantes, incluindo líquidos, vírus e uma ampla gama de bactérias e leveduras comumente associadas com as infecções relacionadas ao uso de cateteres intravenosos. Sua composição proporciona uma proteção imediata e contínua contra a flora da pele.

Indicações:

Pode ser usado para cobrir e proteger o local de inserção dos cateteres e para fixar os dispositivos na pele.


Modo de usar:

Escolha um curativo grande o suficiente para oferecer uma boa margem de adesão à pele saudável e seca ao redor do ponto de inserção do cateter. Qualquer sangramento no local de inserção deverá ser estabilizado antes da aplicação do curativo. Centralize o pad com gel sobre o local do cateter e alise em direção às bordas do curativo cuidadosamente.

Observações:

O local deve ser observado diariamente quanto à presença de sinais de infecção ou outras complicações. Troca o curativo em até 7 dias.

Imagem:

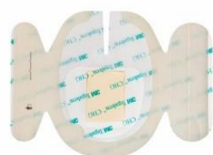

1.5 LIMPEZA DA FERIDA

1.5.1 PRONTOSAN

Categoria:	Limpeza de ferida
Descrição no Tasy	Solução para tratamento de feridas Prontosan
Apresentação	Frasco 350ml
Códigos Tasy Nº Referência	145717 400451
Fabricante	B-Braun
Similar	Pielsana PHMB

Composição:

Água purificada, hidróxido de sódio, 0,1% undecilenamidopropibetaína, 0,1% poliaminopropil biguanida (polihexanida).

Ação:

Para limpeza, descontaminação, tratamento e hidratação de feridas contaminadas, agudas e crônicas, para prevenção e tratamento do biofilme.

Indicações:

Indicado para limpeza,descontaminação, tratamento e hidratação de feridas.

Modo de usar:

Lavar a ferida com prontosan, no caso de feridas com tecido cicatricial espesso, deixar agir por 15 minutos. Não é necessário enxaguar depois.

Observações:

Utilizar o frasco por até 8 semanas após abertura.

Imagem:



1.5.2 SORO FISIOLÓGICO

Categoria:	Limpeza da ferida
Descrição no Tasy	Soro Fisiológico
Apresentação	Frasco 10mL/ 20mL/ 250mL/ 500mL
Códigos Tasy Nº Referência	26981/ 248570/ 38961/38964
Fabricante	Baxter
Similar	Não há

Composição:

Cloreto de sódio 0,9%: Cada mL da solução contém, Cloreto de Sódio 9mg, e água para injetáveis. Conteúdo eletrolítico= sódio 154 mEq/L ; cloreto = 154 mEq/L

Ação:

A solução salina (0,9%) é a solução de limpeza da ferida favorecida porque é uma solução isotônica e não interfere com o processo de cicatrização normal, não causa dano tecidual, não causa sensibilização ou alergias ou altera a flora bacteriana normal da pele.

Indicações:

Utilizado para limpeza de feridas.

Modo de usar:

Aplicar sobre a ferida para limpeza.

Imagem:



1.6 LIMPEZA DA PELE

1.6.1 LENÇO PARA REMOÇÃO DE ADESIVO CONVACARE

Categoria:	Limpador de pele
Descrição no Tasy	Lenço para remoção de adesivo Convacare
Apresentação	Peça única / embalagem individual
Códigos Tasy Nº Referência	243171 1197660
Fabricante	Convatec
Similar	Sensi Care (convatec)

Composição:

É composto de álcool benzílico C12-C15, Dlimoneno, hidrocarbonetos de alta pureza, álcool alquilarílico etoxilado-dietanolamida decoco, álcool 2,4-diclorobenzílico e hidroxitolueno butilado.

Ação:

Formado por uma combinação de líquidos especiais que ajudam na remoção de resíduos adesivos que permanecem na pele ao redor do estoma após a retirada dos dispositivos para cuidados, como bolsas e placas.

Indicações:

É usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos para ostomia, como placas protetoras e outros, que permanecem aderidos à pele ao redor de um estoma.

Modo de usar:

Levante suavemente uma ponta da placa protetora ou do adesivo. Passe o Lenço Removedor de Adesivo entre a pele e a camada interna da placa protetora, aplicada ao redor do estoma, descolando suavemente enquanto continua passando o lenço. Lave a área completamente, enxágue e seque.

Imagem:



1.6.2 CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5%

Categoria:	Limpeza da pele
Descrição no Tasy	Clorohex alcoolico 0,5% incolor
Apresentação	Frasco 100ml
Códigos Tasy Nº Referência	41824
Fabricante	Rioquímica
Similar	Não há

Composição:

É uma solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.

Ação:

É um anti-séptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana.

Indicações:

Indicada como antisséptico tópico.

Modo de usar:

uso externo

Imagem:



1.6.3 LENÇOS UMEDECIDOS

Categoria:	Limpeza de pele
Descrição no Tasy	Lenços Umedecidos Pampers Regular
Apresentação	Embalagem com 64 unidades
Códigos Tasy Nº Referência	118018
Fabricante	Pampers
Similar	Lenços Jonhson

Composição:

Água, propileno glicol, fenoxietanol C12 - C13 paret - 7, peg - 75 lanolina, polisorbato 20, benzoato de sódio, metil parabeno, ácido cítrico, fosfato de sódio dibásico, perfume, EDTA tetrassódico, propilparabeno copoliol dimeticona.

Ação:

Devido às fibras de estrutura flexível e super resistentes que esticam sem rasgar, se adaptam melhor a pele e permitem uma limpeza eficiente e delicada.

Indicações:

Higiene íntima

Modo de usar:

Aplicar diretamente sobre a pele, e descartar após uso.

Imagem:



1.6.4 CLOREXIDINE DEGERMANTE 2%

Categoria:	Limpeza da pele
Descrição no Tasy	Riohex degermante 2%
Apresentação	Frasco 100ml
Códigos Tasy Nº Referência	41827
Fabricante	Rioquímica
Similar	Não há

Composição:

Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos.

Ação:

Antisséptico tópico e antissepsia da pele no pré-operatório.

Indicações:

Indicada como antisséptico tópico e antissepsia da pele no pré-operatório.

Modo de usar:

Uso externo, aconselha-se espalhar na pele e massagear por 3 minutos, após lavar com água.

Observações:

Cuidado com o contato com os olhos.

Imagem:



1.6.5 SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO

Categoria:	Limpeza da pele
Descrição no Tasy	Sabonete Líquido Glicerinado da Cabeça aos Pés
Apresentação	Frasco 200 ml
Códigos Tasy Nº Referência	213459
Fabricante	Jonhson's
Similar	Não há

Composição:

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate/Disodium 2 Sulfolaurate, Glycerin, Polyquaternium-7, Coco-Glucoside/Glyceryl Oleate, Cetyl Betaine, Citric Acid, Sodium Benzoate.

Ação:

Limpa sem ressecar a pele pois contém alto teor de glicerina, ingrediente essencial para o cuidado com a pele. É clinicamente testado, hidratante, e é biodegradável, sem álcool.

Indicações:

Limpeza da pele.

Modo de usar:

Coloque uma pequena quantidade do Sabonete Líquido Glicerinado na mão ou gaze, espalhando pela parte desejada da pele e enxágue em seguida.

Imagem:



1.6.6 TOALHA UMEDECIDA COM DIMETICONA 3% COMFORT SHIELD

Categoria:	Limpeza da pele
Descrição no Tasy	Toalha umedecida c/ dimeticona 3% Comfort Shield
Apresentação	Pacote com 8 unidades
Códigos Tasy Nº Referência	215674 7905-X
Fabricante	Confort Personal Cleansing Product
Similar	Não há

Composição:

Toalhas de limpeza impregnadas com Dimeticona 3%.

Ação:

As toalhas de limpeza impregnadas com Dimeticona 3% promovem a higiene, hidratação e proteção da pele do paciente. Previne e trata a Dermatite Associada à Incontinência. Deixa uma barreira transparente na pele do paciente, permitindo uma avaliação real de toda a área.

Indicações:

Para cuidado da pele do paciente incontinente.

Modo de usar:

Utilizar para higiene íntima, não necessita de enxágue. É aquecido no microondas para um conforto relaxante.

Observações:

Substitui o uso de água, sabão, compressas, recipientes, toalhas, hidratantes e cremes barreiras.

Imagem:



1.6.7 CAVILON LIMPADOR DE PELE SEM ENXÁGUE

Categoria:	Limpeza da pele
Descrição no Tasy	Cavilon limpador de pele sem enxágue
Apresentação	Frasco
Códigos Tasy Nº Referência	
Fabricante	3M
Similar	Toalha com dimeticona 3% (Comfort Shield)

Composição:

Possui o pH ácido que contribui para a manutenção da barreira da pele. Contém surfactantes gentis que limpam a pele sem irritar. Contém agentes hidratantes que ajudam a compensar a perda do fator natural de hidratação. Contém ingrediente à base de dimeticona que suprem lipídios perdidos do estrato córneo.

Ação:

Remove urina, fezes e outras sujidades de maneira eficiente e suave, sem comprometer a integridade da pele do paciente. Tem o pH similar ao da pele quando íntegra e não contem potenciais irritantes. Os surfactantes facilitam a remoção da sujeira, diminuindo a necessidade de fricção durante a higienização.

Indicações:

Higiene íntima

Modo de usar:

Borrife diretamente o cavilon limpador na área desejada ou umedeça um pano macio com o produto, depois remova delicadamente as sujidades com um pano macio. Não é preciso enxáguar, e repita a higienização se necessário.

Imagem:



1.6.8 SENSI CARE

Categoria:	Limpeza da pele
Descrição no Tasy	Sensi care
Apresentação	Frasco Spray 50ml
Códigos Tasy Nº Referência	3272306 413499
Fabricante	Convatec
Similar	Lenço Convacare (convatec)

Composição:

Composto de silicone 100% avançado, não causa ardência nem mesmo em pele ferida.

Ação:

É usado para ajudar a remover os adesivos de dispositivos para ostomia , como placas protetoras , bolsas e curativos .

Indicações:

Para remoção dos adesivos de dispositivos para ostomia.

Modo de usar:

Aplique o produto ao redor do adesivo e espere alguns segundos .Remova o adesivo da pele e aplique mais produto se for necessário.

Observações:

O produto seca em alguns segundos e não prejudica a aplicação de novos adesivos.

Imagem:



1.6.9 SCRUB CHLORHEXIDINE 2%

Categoria:	Limpeza para pele
Descrição no Tasy	Escova Ez Scrub Chlorhexidine 2%
Apresentação	Peça única / embalagem individual
Códigos Tasy Nº Referência	41215
Fabricante	Cristália
Similar	Não há

Composição:

Conjunto escova/esponja com dupla face, embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo.

Ação:

Antisséptico tópico.

Indicações:

Indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório.

Modo de usar:

Retirar da embalagem e realizar fricção com a parte contendo clorexidina 2%.

Imagem:

1.7 PROTETOR CUTÂNEO

1.7.1 LIN-ÓLEO V.DECLAIR

Categoria:	Curativo
Descrição no Tasy	Lin-óleo V.Declair loção
Apresentação	Frasco 200mL
Códigos Tasy Nº Referência	212741 A10200
Fabricante	Neve
Similar	Supriderm

Composição:

Ácidos graxos insaturados, triglicérides de cadeia média, palmitato de retinol e D-Alfa tocoferol.

Ação:

Solução oleosa formada por lipídeos que auxiliam no processo de cicatrização. Linóleo tem por finalidade manter o meio úmido no leito de feridas, favorecendo o processo de cicatrização.

Estimula o debridamento autolítico, o processo de mitose e consequentemente a formação do tecido de granulação no leito da ferida, o qual contribui para a reparação tecidual, e atua na manutenção da integridade da pele.

Indicações:

Úlceras por pressão ou lesões de difícil cicatrização, para manter úmido o leito da ferida e favorecer o processo de cicatrização.

Modo de usar:

Aplique o produto, espalhando uma pequena quantidade na área a ser protegida ou tratada.

Imagem:



1.7.2 CAVILON CREME BARREIRA

Categoria:	Protetor cutâneo
Descrição no Tasy	Cavilon Creme Barreira
Apresentação	tubo de 92g
Códigos Tasy Nº Referência	207914 3392E
Fabricante	3M
Similar	Crema Barrier (Coloplast)

Composição:

Contém o polímero terpolímero, e agentes emolientes e umectantes.

Ação:

Agentes umectantes, como propileno glicol e uréia são substâncias não oleosas que atraem a umidade do ar, retardam a evaporação e ajudam a manter a água na pele. Já, os chamados agentes emolientes como o óleo mineral, palmitato isopropílico, entre outros, são substâncias que preenchem os espaços entre as células epiteliais, ajudando a substituir os lipídios e, portanto, alisando e lubrificando a pele áspera. O terpolímero torna o creme mais resistente a banhos, fazendo com que ele permaneça por mais tempo na pele.

Indicações:

Pele ressecada.

Modo de usar:

É recomendado que seja aplicado após o banho para ajudar a reter a umidade deixada sobre a pele. Aplicar em quantidade moderada no corpo, espalhar de forma uniforme, reaplicar a cada 2 dias.

Observações:

Permite o uso de produtos adesivos como fitas e curativos, permite que a pele respire.

Imagem:



1.7.3 BEPANTOL

Categoria:	Protetor cutâneo
Descrição no Tasy	Bepantol Baby Creme
Apresentação	Tubo 30g
Códigos Tasy Nº Referência	232452
Fabricante	Bayer
Similar	Dermodex Prevent

Composição:

Sua fórmula com vitamina B5, óleo de amêndoas e lanolina

Ação:

A lanolina forma uma barreira protetora transparente, que protege a pele contra agressões externas causadoras de assaduras. A Pró-Vitamina B5 penetra na pele agindo de dentro para fora, deixando-a mais resistente contra assaduras.

Indicações:

Para prevenir assaduras.

Modo de usar:

Após realizar higiene íntima, aplicar uma camada do produto Bepantol.

Imagem:



1.7.4 CAVILON PELÍCULA PROTETORA DE PELE

Categoria:	Protetor cutâneo
Descrição no Tasy	Cavilon película protetora
Apresentação	haste estéril /frasco spray 28ml
Códigos Tasy Nº Referência	46333/ 250661 3346/ 3345
Fabricante	3M
Similar	Dermaplast(Hartmann)

Composição:

É uma solução líquida e transparente, à base de um polímero exclusivo e livre de álcool.

Ação:

É uma solução polimérica que forma um filme uniforme quando aplicada na pele, prevenindo lesões por adesivos devido às trocas constantes de curativos ou fragilidade epidérmica. Diminui a dor e o desconforto em reações de hipersensibilidade a adesivos. Barreira efetiva contra fezes e urina, reduz a dor se a pele já estiver irritada, não transfere para fraldas, não precisa ser removido, seca rapidamente, entre 10 e 30 segundos, não citotóxico e hipoalergênico.

Indicações:

Dermatite associada a incontinência e fragilidade epidérmica

Modo de usar:

Permita que seque completamente antes de cobrir com o curativo ou outros produtos adesivos. A reaplicação é necessária cada vez que o curativo ou produto adesivo for removido

Observações:

Forma uma película protetora transparente que seca rapidamente e permite que a pele respire, completamente livre de álcool, não arde quando aplicado à pele hiperemiada ou lesionada.

Imagem:



