

GUIA PARA ESCOLHA DO ADESIVO PARA PELE SENSÍVEL

TIPO DE ADESIVO	IMAGEM	INDICAÇÃO	TAMANHOS	CÓDIGO TAZY
Fita microporosa azul (não estéril)		Fita adesiva de silicone, utilizada na fixação de curativos convencionais e dispositivos leves. Indicado para pacientes com pele fina, seca e friável e com alto risco de lesão por fricção	Rolo de 2,5cm 5,0m Rolo de 5cm x5m	216923 213578
Flexifix gentle (não estéril)		Filme transparente com adesividade de silicone, pode ser utilizado como “segunda pele” na proteção de áreas de risco como equimoses, hematoma, pele seca, descamativa, áreas de muita manipulação e como cobertura secundária para fixação de curativos.	Rolo de 10cm x 5m Rolo de 2,5cm x 5m	273214 273213
Mepilex border (estéril)		Curativo de espuma com múltiplas camadas com bordas e adesividade de silicone, utilizado em feridas com moderada exsudação e na profilaxia de lesões ocasionadas pelo atrito e pressão.	10 x 10cm 15 x 15cm 15 x 20cm 18 x 18cm (sacrum) 23 x 23cm (sacrum)	146997 188467 194204 204941 204942
Mepilex absorvente		Curativo de espuma e silicone, sem bordas adesivas, utilizado em feridas com moderada exsudação onde não se pode aplicar adesivos e cuja fixação será com ataduras. Pode ser usado também como coxim para aliviar áreas de pressão geralmente pelo uso de algum dispositivos.	10 x 10cm 20 x 20cm	187294 185679



HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

Biatain Silicone lite (estéril)		Curativo de fina camada de espuma com borda adesiva de silicone, utilizado em qualquer tipo de lesão com baixa ou nenhuma exsudação como por exemplo lesão por fricção ou para proteção da pele em áreas de risco.	10 x 10 cm 7,5 x 7,5 cm	267077 267078
Mepitel film (estéril)		Curativo transparente com adesividade de silicone. É uma opção para curativos na inserção de cateter na qual a pele ao redor é muito friável ou há reações alérgicas aos curativos padronizados. Pode ser usado como “segunda pele”, para proteger pele frágil e sensível e minimizar o risco de rompimento da pele.	10 x 12 cm	293167

Observação: curativos de silicone possuem menor adesividade por isso possui necessidade de maior área de contato com a pele.

TIPO DE ADESIVO	IMAGEM	INDICAÇÃO	TAMANHOS	CÓDIGO TAZY
Micropore (não estéril)		Fita adesiva de acrilato, utilizada na fixação de curativos convencionais e dispositivos. Atentar na utilização em pele sensível. Deve-se aplicar sem tração (sem estar muito esticado) e utilizar removedor de adesivos na remoção (Sensicare e Convacare). Desvantagem de sujar e umedecer quando em contato com secreções, fezes e urina.	Rolo de 12,5mm x 10mt Rolo de 25mm x 10mt Rolo de 50mm x 10mt Rolo de 100mm x 10mt	46306 46307 46309 46308
Transpore (não estéril)		Fita adesiva de polietileno e transparente utilizada na fixação de curativos convencionais e dispositivos. Atentar na utilização em pele sensível. Aplicar sem tração (sem estar muito esticado) e utilizar removedor de adesivos par a remoção (Sensicare e Convacare). Tem a vantagem de não sujar e umedecer quando em contato com secreções, fezes e urina	Rolo de 100mm x 4,5m	46305
Tensoplast		Bandagem elástica fornece suporte forte e flexível, além de compressão, devido ao seu substrato poroso de alta qualidade. Sua grande elasticidade e capacidade adesiva mantêm a bandagem firmemente no lugar, sendo muito utilizado no hospital para fixação de tubo orotraqueal e alguns curativos.	Rolo de 7,5cm x 4,5m Rolo de 10cm x 4,5m Rolo de 5 cm x 4,5m	45819 48520 45818
Esparadrapo		Fita adesiva de acrilato, apresenta alta adesividade, resistente; evitar o uso direto com a pele; no hospital é mais utilizada em equipamentos e pouco utilizada sobre a pele pelo risco de lesões de pele.	Rolo de 5cm x 4,5m Rolo de 10cm x 4,5cm	972 46303

Observação: Curativos com adesividade de acrilato deve-se ficar atento quanto a adesividade das coberturas, pois pacientes com pele sensível podem sofrer danos. Sempre utilizar removedores de adesivos (Sensicare ou Convacare).

Elaboração: Equipe de Estomaterapia

Revisado: Farmacêutica Especialista de Materiais /2019

GUIA PARA ESCOLHA DO REMOVEDOR DE ADESIVO

REMOVEDOR	IMAGEM	INDICAÇÃO	TAMANHO	CÓDIGO TAZY
Sensicare		Spray a base de silicone para proteção da pele, promove a remoção de adesivos de maneira rápida, indolor, sem lesões e resíduos, além de proteger a pele dos efeitos nocivos durante a remoção dos adesivos. Usado para ajudar a remover os adesivos de dispositivos para ostomia como placas protetoras, bolsas e curativos.	Frasco 50 ml	272306
Convacare		Lenço removedor de adesivo saturado com uma combinação de líquidos especiais que ajudam na remoção de resíduos adesivos. Ajuda a remover os adesivos usados em dispositivos para ostomia, placas protetoras, curativos, entre outros.	Sachê individual	243171
Removex		Removedor de adesivo a base de álcool etílico, mais utilizado no hospital para remover placas adesivas de dispositivos e superfícies.	Frasco 100 ml	138470