



MANUAL DE PRODUTOS ADESIVOS

1. ADESIVOS DE SILICONE

- **FITA AZUL DE SILICONE**

Apresentação: 2,5cm x 1,3m - 5,0cm x 1,3m - 2,5cm x 5m - 5,0cm x 5m

Composição: Hipoalergênica, fita adesiva de silicone composta por dorso microporoso de não tecido formado por uma mistura de fibras de rayon e poliéster.

Ação: Os adesivos de silicone têm menor tensão superficial do que os adesivos tradicionais, fazendo que o silicone se adapte aos contornos naturais da pele e se fixem com segurança imediatamente reduzindo a dor e o trauma causados na remoção da fita.

Indicações: Recomendada para uso diário e prolongado, é ideal para fixação de curativos, cateteres, sondas e curativos de drenos. Pele fina, seca e friável e com alto risco de lesão por fricção. Pacientes alérgicos ao adesivo acrilato tradicional ou fitas a base de látex ou sensibilizados a fitas.

Aplicação: Limpar e secar a área antes da aplicação. Aplicar firmemente a fita adesiva sobre a pele e sobre os dispositivos para maximizar superfície de contato e adesão.

Contraindicação: Não é recomendado o uso da fita de Silicone para fixação primária de tubos críticos.

Considerações gerais e características:

- ✓ A fita de silicone mantém a mesma força adesiva desde o momento da sua aplicação e após 48 horas de uso.
- ✓ Em caso de edema a fita de silicone remoção suave oferece uma alta performance pois não tenciona as estruturas da pele.
- ✓ Pode ser removida e reposicionada, mantendo sua adesividade.



- **OPSITE FLEXIFIX GENTLE**

Apresentação: 2,5 cm x 5m, 5 cm 5m, 10cm x 5m.

Composição: Filme de Poliuretano adicionado de Etileno Bis Oleamida (EBO), transparente, revestido com silicone adesivo.

Ação: É uma película flexível, facilmente adaptável a áreas de contorno do corpo. É impermeável à água e bactérias, prevenindo a contaminação externa e altamente permeável a trocas gasosas. Possui suporte quadriculado, que permite a medição da ferida de forma simples e precisa, facilitando a observação do processo de cicatrização.

Indicações: Indicado na fixação de curativos e tubos, proteção da pele e para colocação sobre bolsas de ostomia.

Contraindicação: Não deve ser utilizado diretamente sobre feridas, peles rachadas ou locais de inserção de cateter.

Modo de usar: Corte o comprimento de filme desejado e aplique o filme adesivo na área desejada e pressione sobre a pele.

Considerações gerais: O adesivo de silicone minimiza o risco de danos à pele no momento da remoção, especialmente após longo período de uso.

- **MEPITEL FILM**

Apresentação: 6x7cm, 10x12cm, 10x25cm, 15x20cm.

Composição: Possui película de poliuretano termoplástico revestida com uma camada de contato Safetac.

Ação: Curativo impermeável que fornece uma cobertura transparente flexível para proteger a pele ou a ferida de contaminação microbiana e penetração de fluidos ou contaminação externa. Ele entra em contato com a pele lesada e atua como uma barreira mecânica com principal intenção de gerenciar o microentorno da ferida. Sua película transparente permite que a fácil inspeção da pele.

Indicações: Cobertura protetora de feridas cirúrgicas, fixação de curativo principal como curativo secundário e protege a pele frágil e sensível.

Contraindicação: Não utilizar para fixar cateteres em aplicações I.V., cânulas, adaptadores, ou outros dispositivos de perfusão ou de suporte de vida.



Modo de usar: Limpar e secar a área antes da aplicação e aplique o lado adesivo sobre a ferida. O adesivo deve cobrir a pele seca circundante em, pelo menos, 1-2 cm para tamanhos até menores 10x12 cm e 5 cm nos tamanhos superiores, de modo que a fixação fique segura.

Considerações gerais:

- ✓ Pode permanecer no local até 14 dias durante o qual o curativo absorvente secundário deverá ser trocado sempre que necessário.
- ✓ O curativo pode ser removido sem que exista desprendimento da pele e sem dor

2. ADESIVOS DE ACRILATO

- **MICROPORE**

(Fita Micropore Nexcare)

Apresentação: 100 mm x 4,5 m, 12 mm x 4,5 m, 25 mm x 0,9 m, 25 mm x 4,5 m, 50 mm x 4,5m.

Composição: Hipoalergênica, não tecido acrílico.

Ação: É uma fita microporosa que não deixa resíduos ou irritações na pele, devido a sua remoção fácil é ideal para mudanças frequentes dos curativos ou gases, não interfere nas funções normais da pele e permite que ela transpire para melhor conforto.

Indicações: Ideal para fixação de curativos, gases, cateteres, sondas e curativos de drenos. Principalmente paciente com pele frágil sensível como neonatos e pacientes idosos.

Modo de usar: Limpar e secar a área antes da aplicação. Cortar o comprimento de Micropore de 1 a 2 centímetros mais longo do que o curativo e aplicar a fita na área desejada. Substitua a fita sempre que for preciso e use mais tiras de fita para reforçar o curativo, se necessário, entre as trocas de curativos.



- **TRANSPORE**

Apresentação: 10cm x 4,5m

Composição: Fita hipoalergênica, composta por polietileno de baixa densidade, transparente, macroperfurado.

Ação: A fita pode ser facilmente cortada manualmente em ambas as direções sem a necessidade de usar tesoura. Possui alta aderência inicial em pele seca e, moderada, em pele úmida. É versátil e segura para aplicações de curta duração que exigem rapidez e facilidade de manipulação. Apresenta resistência a penetração de excesso de água ou umidade.

Indicações: Indicado para aplicações de curta duração em peles normais. Estabilização de tubos, curativos e dispositivos leves de uso médico.

Aplicação: Limpar e secar a área antes da aplicação. Aplicar a fita sem tensionar e alisar toda a superfície do suporte com pressão firme para melhorar a aderência. Deve se estender pelo menos 2 cm além do limite do curativo.

Considerações gerais:

- ✓ Não devem ser aplicadas diretamente sobre locais que requerem esterilidade, como leito feridas e locais de punção intravenosa.
- ✓ A remoção deve ser feita de forma lenta e no mesmo sentido do crescimento dos pêlos, sustentando a pele no ponto de remoção para evitar traumatismo no local.
- ✓ Pode ser facilitada utilizando-se um removedor de adesivo.

- **TENSOPLAST**

Apresentação: 5cm x 4.5m 7.5cm x 4.5m 10cm x 4.5m

Composição: Bandagem adesiva de algodão e rayon com adesivo de borracha permeável

Ação: A bandagem elástica Tensoplast fornece suporte forte e flexível, além de compressão, devido ao seu substrato poroso de alta qualidade. Sua grande elasticidade e capacidade adesiva mantêm a bandagem firmemente no lugar, mesmo durante longos tratamentos.



Indicações: Tratamento de todas as condições que exigem limitação de movimentos, como lesões esportivas, entorses e tensões. Uso profilático durante atividades esportivas. Varizes e úlceras (flebíticas e trombóticas). Curativos compressivos.

Considerações gerais:

- ✓ Permite a passagem de ar e umidade.
- ✓ Adesivo poroso que ajuda a prevenir a maceração da pele

3. FILMES TRANSPARENTES:

- **OPSITE FLEXIGRID**

Apresentação: 6cm X 7cm, 10cm X 12cm, 10cm X 12cm, 15cm X 20cm, 12cm X 25cm

Composição: Adesivo hipoalérgico, constituído de fina película transparente de poliuretano com uma camada adesiva acrílica. Esta película é sustentada por um filme plástico quadriculado que proporciona um sistema de aplicação simples e possibilita a mensuração do tamanho da lesão.

Ação: Causam autólise do tecido necrótico por manutenção do meio úmido. Apresenta permeabilidade seletiva, permite a difusão gasosa e evaporação de excesso de exsudato prevenindo a maceração da pele. Impermeável a fluidos e microorganismos, fornecendo assim uma barreira mecânica; permite a sua visualização da lesão.

Indicações: Feridas superficiais, como roçaduras, queimaduras superficiais, cortes e abrasões. Profilaxia e proteção de lesão por pressão, em volta de estomas e bolsas de ostomia. Pode ser usado como cobertura secundária para outros curativos. Diminuição da dor em neuropatias diabéticas.

Modo de usar: Realizar limpeza da pele com SF0.9% para remoção da oleosidade e secar com gaze, aplicar diretamente sob a pele ou associado a outros curativos. Remover o suporte plástico, ao mesmo tempo que fixa a película pressionando-a sobre a pele.

Considerações Gerais:

- ✓ A troca deve ser feita quando perder a transparência ou se houver sinais de infecção. O curativo pode permanecer aplicado à pele por até 14 dias.



- ✓ Se não for retirado adequadamente pode lesar a pele; não absorve exsudato.
- ✓ Não adere muito bem na região sacral ou em peles oleosas

- **OPSITE IV3000**

Apresentação: 5cm x 6cm, 6 cm x 7 cm, 10 cm x 12 cm, 7 cm x 9 cm, 9 cm x 12 cm, 14cm x 11, 6 cm x 7 cm, 10 cm x 12 cm.

Composição: Curativo hipoalergênico, composto por película fina e transparente com permeabilidade controlada.

Ação: O Curativo Opsite IV3000 possui barreira viral e bacteriana, proporciona uma aplicação asséptica rápida e fácil. Além de ser transpirável e mais permeável ao vapor de água que as películas convencionais.

Indicações: Adequado para fixação de cateteres de linha central e periféricos.

Contraindicação: Para feridas abertas como, úlceras por pressão, queimaduras ou áreas doadoras.

Modo de usar: Limpar e secar a área antes da aplicação. Remover o protetor plástico de suporte levantando a ponta não adesiva, puxando-a na diagonal até sua total remoção, e aplique na região desejada. Para remover o curativo, puxe-a paralelamente à pele com uma das mãos, enquanto a outra segura a pele local e o cateter.

- **HYDROFILM PLUS**

Apresentação: 5 x 7 cm, 8 x 12 cm, 9 x 10 cm, 9 x 15 cm, 10 x 12 cm, 10 x 20 cm, 10 x 25 cm, 12 x 25 cm, 10 x 30 cm.


Composição: Curativo hipoalergênico, composto de filme poliuretano semipermeável transparente com adesivo de acrilato e compressa com tecido não tecido de viscose.

Ação: É um curativo autoadesivo e estéril com uma compressa absorvente. Forma uma barreira à passagem de fungos e bactérias, proporciona uma respiração saudável da pele. A película transparente possibilita a observação da ferida e da absorção do exsudado pelo núcleo absorvente.

Indicações: Cobrir e proteger feridas secas, não infectadas e com secreções escassas podendo ser usado nos cuidados estéreis do pós-operatório. Pode ser usado como barreira à prova de água e microorganismos cobrindo curativos absorventes ou para segurar cânulas ou cateteres

Contraindicação: Não utilizar em feridas infectadas com exsudato em média em grande quantidade e feridas sangrantes.

Modo de usar: A aplicação é feita conforme ilustrações abaixo, seguindo os 4 passos numerados no papel adesivo no verso do curativo. Pode-se raspar zonas de pele muito pilosa antes da aplicação caso desejado.

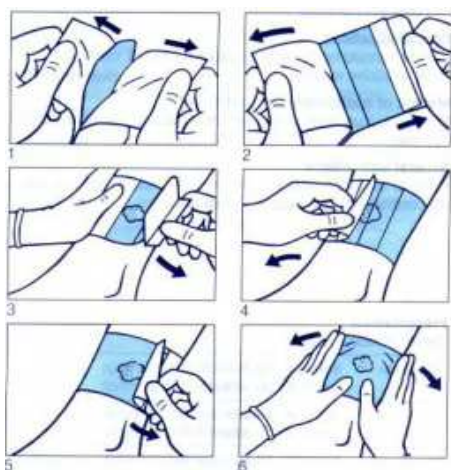

Considerações gerais: O curativo pode permanecer por até 7 dias.

- **TEGADERM IV ADVANCED**

Apresentação: 6,5cm x 7cm.

Composição: Curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico hipoalergênico resistente à água e fibras de poliéster não tecidas.

Ação: Curativo possui sistema avançado de fixação de cateter com exclusivo desenho para estabilização do cateter e favorece uma melhor fixação na pele, permite uma adequada respiração da pele. Composto por uma película semipermeável, apresenta visualização contínua do sítio de inserção.

Indicações: Cateter periférico em adultos e pediatria. Cateter central em pediatria.



Modo de usar: Limpar e secar a área antes da aplicação. Centralize o filme transparente de forma a visualizar o sítio de inserção e aplique na pele aplicando pressão para melhor fixação

Reforce o fixador com a fita larga adicional estabilizadora.

Considerações gerais:

- ✓ Pode permanecer até 07 dias fixados sobre o sítio de inserção, com a possibilidade de observação constante através da transparência.

• TEGADERM IV ADVANCED

Apresentação: 10x 12cm/ 8,5 x 11,5cm

Composição: Filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo e um pad em gel integrado. O pad é composto por gluconato de clorexidina (2%), triglicerol, polivinil pirrolidona reticulado, goma hidroxipropil, glucona lactona.

Ação: O filme transparente estéril proporciona uma barreira para contaminantes, incluindo líquidos, vírus e uma ampla gama de bactérias e leveduras comumente associadas com as infecções relacionadas ao uso de cateteres intravenosos.

Indicações: Pode ser usado para cobrir e proteger o local de inserção dos cateteres e para fixar os dispositivos na pele.

Modo de usar: A pele deve estar saudável e seca ao redor do ponto de inserção do cateter. Qualquer sangramento no local de inserção deverá ser estabilizado antes da aplicação do curativo. Centralize o pad com gel sobre o local do cateter e alise em direção às bordas do curativo cuidadosamente.

Considerações gerais: O local deve ser observado diariamente quanto à presença de sinais de infecção ou outras complicações. Troca o curativo em até 7 dias.



4. PRODUTOS PARA A REMOÇÃO DE ADESIVOS MÉDICOS:

- **CONVACARE**

Apresentação: embalado individualmente em sachês

Composição: É composto de álcool benzílico C12-C15, Dlimoneno, hidrocarbonetos de alta pureza, álcool alquilarílico etoxilado-dietanolamida decoco, álcool 2,4-diclorobenzílico e hidroxitolueno butilado.

Ação: Lenço Removedor de Adesivo é um lenço não estéril, branco, de um material não trançado, saturado com uma combinação de líquidos especiais que ajudam na remoção de resíduos adesivos.

Indicações: É usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos para ostomia, como placas protetoras e outros, que permanecem aderidos à pele ao redor de um estoma.

Modo de usar: Levante suavemente uma ponta da placa protetora ou do adesivo e passe o Convacare. Descolando suavemente enquanto continua passando o lenço. Lave a área completamente, enxágue e seque.

- **SENSICARE**

Apresentação: spray e sachê

Composição: a base de silicone.

Mecanismo de ação: Remoção de adesivos de maneira rápida, indolor, sem lesões e resíduos, além de proteger a pele dos efeitos nocivos durante a remoção dos adesivos. O uso contínuo de adesivo em pele vulnerável pode causar sintomas e complicações como: descamação da pele, vermelhidão ou irritação, ardência, dor e acúmulo de resíduos;

Indicações: É usado para ajudar a remover os adesivos de dispositivos para ostomia como placas protetoras e bolsas, e curativos.

Modo de usar: Aplique o spray no adesivo até o mesmo começar a descolar sozinho. Continue aplicando o spray e puxe o adesivo aos poucos, conforme vai descolando, até remover completamente.



- **REMOVEX**

Apresentação: frasco de 100ml

Composição: Éter Alcoolizado / Licor de Hoffman

Mecanismo de ação:

O **éter** etílico, possui outras denominações como: **éter** sulfúrico, **éter** dietílico ou etoxietano. É um líquido incolor, de cheiro característico, que ajuda na remoção de adesivos.

Licor de Hoffmann ou éter alcoolizado é uma solução composta por éter etílico e álcool etílico, utilizada na farmacotécnica como veículo. Aplicando-se na pele, este composto remove sua oleosidade,

Indicações: remoção de fitas adesivas e desengordurar a pele. **Porém no HSL está mais indicado para remover adesivos de superfícies**

Modo de usar: aplicar sobre a área e realizar leve fricção.